

D Gebrauchsanweisung

Rollator TITAN City
TT 9203



Hilfsmittel Nr.: 10.50.04.1223



Hersteller:

TriPart Logistic GmbH
Heckhofweg 146
50739 Köln



Gebrauchsanweisung

Allgemeines

Für den hier beschriebenen Rollator ist die Konformität gemäß der EG – Richtlinie 93/42, für Medizinprodukte, erklärt. Diese Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Lieferumfangs. Sie ist beim Benutzer bereitzuhalten und bleibt auch bei Weitergabe des Produktes beim Produkt. Änderungen durch technische Weiterentwicklungen gegenüber den in dieser Gebrauchsanweisung dargestellten Ausführung behalten wir uns vor.

Nachdrucke, Übersetzungen und Vervielfältigungen in jeglicher Form, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Herstellers.

Das Urheberrecht liegt beim Hersteller.

Diese Gebrauchsanweisung unterliegt keinem Änderungsdienst. Den jeweils aktuellen Stand erfahren Sie gerne bei uns.

Indikation und Verwendungszweck

Der Rollator TITAN City dient bewegungseingeschränkten Personen mit max. 136 kg Körpergewicht als Gehhilfe, bzw. bei Nutzung der serienmäßigen Fußstützen als passiver Rollstuhl (kein Selbstfahrer – Rollstuhl) und eingeschränkt auch als Sitzgelegenheit zum vorübergehenden Ruhen. Die unter der Sitzfläche eingehängte Einkaufstasche ist zur Ablage und zum Transport von Gegenständen oder Waren vorgesehen und geeignet.

Der Rollator TITAN City darf nur auf festem und ebenem Untergrund verwendet werden. Er ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.

Kontraindikationen sind bei bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht bekannt. Die Benutzung zu anderen Zwecken, insbesondere die Verwendung als Aufstiegshilfe oder zum Transportieren schwerer Lasten ist bestimmungswidrig und gefährlich!

Aufstellen / Entfalten des Rollators

- Positionieren Sie den Rollator vor sich in Fahrtrichtung
- Betätigen Sie die Feststellbremse
- Drücken Sie mit beiden Händen die Ränder des Sitzes nach unten bis diese merklich einrasten (siehe Bild roter Pfeil)
- Klappen Sie die Rückenlehne in Gebrauchsposition



D Gebrauchsanweisung

Falten des Rollators

- Positionieren Sie den Rollator in Fahrrichtung vor sich und betätigen Sie die Feststellbremsen
- Ziehen Sie die Schlaufe auf dem Sitz nach oben (Roter Pfeil)
- Halten Sie dabei den Rollator mit der einen Hand am Handgriff
- Nun drücken Sie den Rollator ganz zusammen (Blauer Pfeil)



Schiebegriff einstellen

- Betätigen Sie als Erstes die Feststellbremse
- Drücken Sie den Druckknopf an der Außenseite des Rahmens rein (Roter Pfeil)
- Positionieren Sie die Schiebegriffe in der korrekten Höhe
- Anschließend lassen Sie den Druckknopf los
- Achten Sie bitte darauf das der Druckknopf in den dazu vorgesehenen Löchern Im Rahmen vollständig einrastet



D Gebrauchsanweisung



Achten Sie bitte darauf die Schiebegriffe in der richtigen Höhe einzustellen um die größtmögliche Sicherheit beim Benutzen des Rollators und ein bequemes Gehen zu gewährleisten.

Betriebs- und Feststellbremse


- Die dosierbare Bremse wird als Betriebsbremse (beim Schieben) durch ziehen des Bremshebels nach oben verwendet
- Durch Drücken des Hebels nach unten wird die Bremse als Feststellbremse (beim Parken) verwendet



D Gebrauchsanweisung

Bremseinstellung

- Die Bremswirkung kann direkt an der Bremse (Blauer Pfeil) eingestellt werden
- Die Bremse ist korrekt eingestellt, wenn die Bremshebel, wie auch die Bowdenzüge, kein Spiel aufweisen und die Räder sich ohne Schleifgeräusche drehen lassen

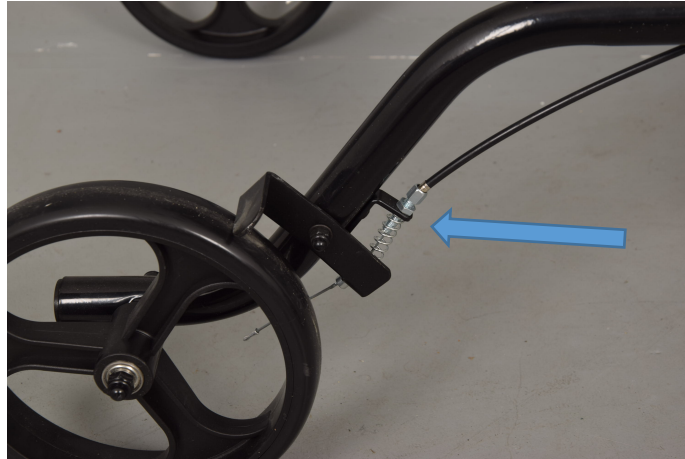

Rückengurt


- Der Rückengurt ist so veränderbar, dass Sie sich beim Sitzen von vorne oder von hinten auf dem Rollator anlehnen können
- Bei Bedarf können Sie den Rückengurt einfach in die benötigte Richtung ziehen



D Gebrauchsanweisung

Fußstützen optional im Zubehör erhältlich

- Um die Fußstützen im passiven Rollstuhlbetrieb zu nutzen lösen Sie diese einfach aus den Schnappverschlüssen an dem unteren Rahmen (Roter Pfeil)
- Klappen Sie die Fußstützen einfach nach vorne bis diese hörbar und spürbar einrasten

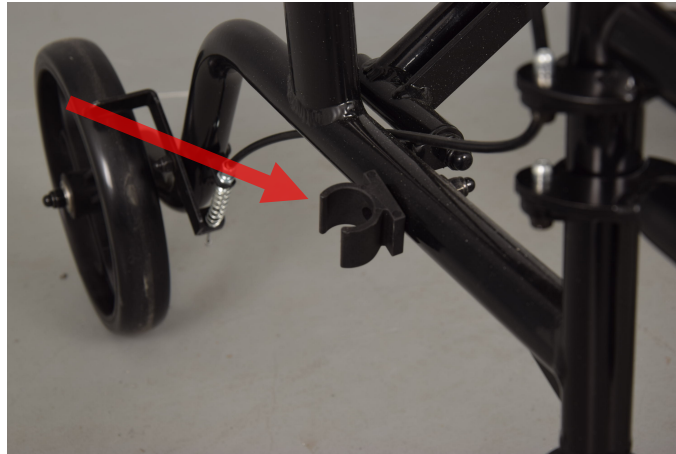

D Gebrauchsanweisung

- Bei Bedarf können Sie die Fußstützen auch einfach komplett entfernen
- Hierzu Drücken Sie den silbernen Hebel nach innen (Roter Pfeil), dabei entriegelt der Verschluss.
- Drehen Sie die Fußstütze ca. 90° nach außen, so dass Sie die Fußstütze nach oben von der Führung lösen können (Blauer Pfeil)



Sicherheitshinweise

- Bitte hängen Sie zur eigenen Sicherheit KEINE Taschen an die Griffe
- Beim Benutzen auf abschüssigen Wegen benutzen Sie bitte die Betriebsbremse
- Benutzen Sie den Rollator nur auf ebenem, horizontalem und festem Untergrund
- Beim starken Aufstützen auf die Handgriffe kann der Rollator nach hinten kippen
- Beim Zusammenklappen des Rollators können Kleidungs- oder Körperteile eingeklemmt werden
- Bitte beachten Sie, dass die Polsterteile, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, aufheizen und bei Berührung Hautverletzungen verursachen können. Decken Sie daher diese Teile ab oder schützen Sie den Rollator vor Sonneneinstrahlung



Gebrauchsanweisung

Reinigung

Die Reinigung und Desinfektion sollten in regelmäßigen Abständen (bei Benutzerwechsel zwingend erforderlich) durchführen. Zur Reinigung verwenden Sie eine milde Seifenlauge ohne Scheuerzusätze.

Die Desinfektion können Sie mit handelsüblichen Mitteln durchführen. Verwenden sie keine Hochdruckreiniger, Dampfstrahlgeräte und keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel!

Wartung

Der Rollator ist wartungsfrei. Wenn Sie ein Nachlassen der Bremsen, Schwergängigkeit der Räder oder andere Funktionseinschränkungen feststellen, ist der Rollator für eine Instandsetzung dem Fachhandel zu übergeben.

Wiedereinsatz

Bei der Weitergabe / Wiedereinsatz des Rollators denken Sie bitte daran sämtliche für eine sichere Handhabung notwendigen technischen Unterlagen dem neuen Benutzer zu übergeben. Der Rollator ist problemlos für einen Wiedereinsatz geeignet. Der Rollator muss durch den Fachhandel, wie oben angegeben, überprüft, gereinigt und für den Wiedereinsatz in einen einwandfreien Zustand versetzt werden. Der Rollator wird gebrauchsfertig ausgeliefert und kann sofort entfaltet und angepasst werden. Eine Montage ist nicht erforderlich.

Lieferumfang

- Rollator TITAN City
- Einkaufstasche
- Gebrauchsanweisung
- Stockhalter

Garantie

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate und bezieht sich auf alle Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material – oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind

Technische Daten

Maximale Zuladung	:	136 kg / Einkaufstasche 3 kg
Leergewicht	:	9,3 kg
Gesamtbreite	:	625 mm
Gesamttiefe	:	710 -980 mm
Gesamthöhe	:	800 – 1000 mm
Abstand zwischen den Handgriffen	:	480 mm
Wendedurchmesser	:	710 mm
Sitzhöhe	:	560 mm
Verstellungen	:	Schiebegriff 860 – 980 mm
Bereifung	:	Ø 200 mm x 37 mm, pannensicher Vorderräder lenkbar, Hinterräder starr
Material Rahmen	:	Aluminium
Material Sitz	:	gewebter Nylonsitz
Material Handgriffe	:	PVC
Material Bremshebel	:	Polypropylen