

Ⓛ Gebrauchsanweisung

Toilettenstuhl TITAN Clean TT 8805



Hilfsmittel Nr.: 18.46.02.0063



Hersteller:

TriPart Titan GmbH & Co.KG
50739 Köln

Übersicht Toilettenstuhl TITAN Clean

- 1. Allgemeines**
- 2. Hinweis**
- 3. Lieferumfang und Lieferzustand**
- 4. Transport / Verpackung**
- 5. Auspacken**
- 6. Hinweise des Herstellers für den Fachhandel**
- 7. Richtlinie, Gesetze, Normen**
- 8. Ordnungsgemäße Verwendung**
- 9. Materialien**
- 10. Allgemeine Sicherheitshinweise**
- 11. Benennung der Einzelteile**
- 12. Montage**
- 13. Sitzen**
- 14. Arretieren der Feststellbremse**
- 15. Entnahme von Eimer und Sitzbrille**
- 16. Abstellen und Verwahrung**
- 17. Reinigen**
- 18. Problembehandlung**
- 19. Wartung**
- 20. Wiedereinsatz**
- 21. Entsorgung**
- 22. Garantie**
- 23. Technische Daten**

Gebrauchsanweisung

1. Allgemeines

Für den hier beschriebenen Toilettenstuhl ist die Konformität gemäß der EG-Richtlinie 93/42, für Medizinprodukte, erklärt.

Diese Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Lieferumfangs.

Sie ist beim Benutzer bereitzuhalten und bleibt auch bei Weitergabe des Produktes beim Produkt.

Änderungen durch technische Weiterentwicklungen gegenüber den in dieser

Gebrauchsanweisung dargestellten Ausführung behalten wir uns vor.

Nachdrucke, Übersetzungen und Vervielfältigungen in jeglicher Form, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Herstellers.

Das Urheberrecht liegt beim Hersteller.

Diese Gebrauchsanweisung unterliegt keinem Änderungsdienst. Den jeweils aktuellen Stand erfahren Sie gerne bei uns.

Indikation und Verwendungszweck

Der Toilettenstuhl TITAN Clean dient bewegungseingeschränkten Personen mit max. 113 kg Körpergewicht als Toilettensatz und eingeschränkt auch als Sitzgelegenheit zum vorübergehenden Ruhen.

Der Toilettenstuhl TITAN Clean darf nur auf festem und ebenem Untergrund verwendet werden. Er ist nur für den Gebrauch im häuslichen Gebrauch (Innenbereich) geeignet.

Des weiteren kann der TITAN Clean in Pflegeeinrichtungen und im Klinikbereich eingesetzt werden.

Kontraindikationen sind bei bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht bekannt. Die Benutzung zu anderen Zwecken, insbesondere die Verwendung als Aufstiegshilfe oder zum Transportieren schwerer Lasten ist bestimmungswidrig und gefährlich!

2. Hinweis

Sehr geehrte Benutzerin,

Sehr geehrter Benutzer,

vielen Dank für Vertrauen und den Erwerb Ihres neuen Toilettenstuhls TITAN Clean.

Sie haben sich für ein funktionales, technisch ausgereiftes und nach dem aktuellsten Stand der Technik konstruiertes und zuverlässiges Produkt entschieden.



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung unbedingt **bevor** Sie den Toilettenstuhl TITAN Clean montieren und benutzen.

Diese Bedienungsanleitung ist für alle Anwender und dient besonders dem Betreuungspersonal als Handlungsgrundlage für sichere und gefahrlose Nutzung des TITAN Clean.

Diese Anweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege Ihres neuen TITAN Clean.

Um die Benutzung sinnvoll und sicher zu machen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung und halten Sie die vorgegebenen Anweisungen und Hilfestellungen ein und sorgen dafür, dass

Gebrauchsanweisung

die Gebrauchsanweisung für die aktuellen und zukünftigen Benutzer einsehbar bleibt.

3. Lieferumfang und Lieferzustand

Der Lieferumfang beinhaltet:

- TITAN Clean Toilettenstuhl bestehend aus
 - Stuhlrahmen mit Rollen
 - Sitz mit Toiletteneimer und Deckel
 - Armlehnen und Rückenteil
 - Sitzpolster
 - Beinstützen mit Wadenband
 - 1 Gebrauchsanweisung
 - 1 Verpackungs- und Transportkarton (wiederverwendbar)

4. Transport/ Verpackung

Der Toilettenstuhl wird im teilmontierten Zustand ausgeliefert und von Fachhandels-Technikern, bzw. vom Betreuungspersonal montiert und auf reibungslose Funktionalität überprüft.



Vor dem Auspacken die Verpackung überprüfen. Ist die Verpackung beschädigt, kann auch der Inhalt beschädigt sein.

Ist der Inhalt sichtbar beschädigt, wenden Sie sich bitte an den ausliefernden Partner.

5. Auspacken

Der TITAN Clean ist komplett in Folie verpackt. Nach dem Entpacken entsorgen Sie bitte die Folie nach den jeweiligen regionalen Vorschriften. Nach dem Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit und Vollzähligkeit gem. Punkt 1.1 überprüfen.

6. Hinweise des Herstellers für den Fachhandel

Der Fachhandel prüft den TITAN Clean

- auf Vollständigkeit,
- auf die Unversehrtheit der Teile und insbesondere auf die ordnungsgemäße Funktion der beweglichen Teile,
- ob die Lieferung ohne Beanstandung zusammengebaut und die einwandfreie Funktion festgestellt wurde.

7. Richtlinien, Gesetze, Normen

Angewandte Richtlinien, Gesetze, Normen und Regelwerke:

- Richtlinie des Rates 93/42 EWG, Medizinprodukte
- MPG, (Medizin-Produkte-Gesetz) der Bundesrepublik Deutschland
- Medizin-Geräte-Verordnung

8. Ordnungsgemäße Verwendung

Der TITAN Clean ist ausschließlich für die Verrichtung der Notdurft durch Personen bis max. 113 kg Körpergewicht vorgesehen.

Für die Benutzung als dauernde Sitzgelegenheit ist der TITAN Clean nicht geeignet. Der TITAN Clean darf nur auf ebenen Flächen eingesetzt werden.

9. Materialien

Bei Einhaltung der bestimmungsgemäßen Verwendung geht von der Benutzung des Toilettenstuhls keine Gefahr aus.

Die verwendeten Materialien und die Konstruktion entsprechen den Anforderungen aus den EG- Richtlinien, dem Medizin- Produkte- Gesetz, der Medizin- Geräte- Verordnung und den Normen für Medizinprodukte.

10. Allgemeine Sicherheitshinweise




Bitte Vorsicht - Verletzungsgefahr!

Beim Hinsetzen, Aufstehen und beim Verschieben des Toiletteneimers können

- Kleidungsteile und / oder Körperteile eingeklemmt werden.
- beim Hoch – oder Runterklappen der Armlehnen können Kleidungs- und / oder Körperteile in den Halterungen eingeklemmt werden.
- Bei der Benutzung des TITAN Clean **immer** die Feststellbremsen an den hinteren Rädern betätigen, um einen sicheren Stand zu haben
- Die Kippsicherheit ist beim TITAN Clean geringer als z.B. bei einem Rollstuhl, deshalb seien Sie vorsichtig und lehnen Sie sich nicht zu weit zur Seite raus.

11. Benennung der Einzelteile

Ⓛ Gebrauchsanweisung

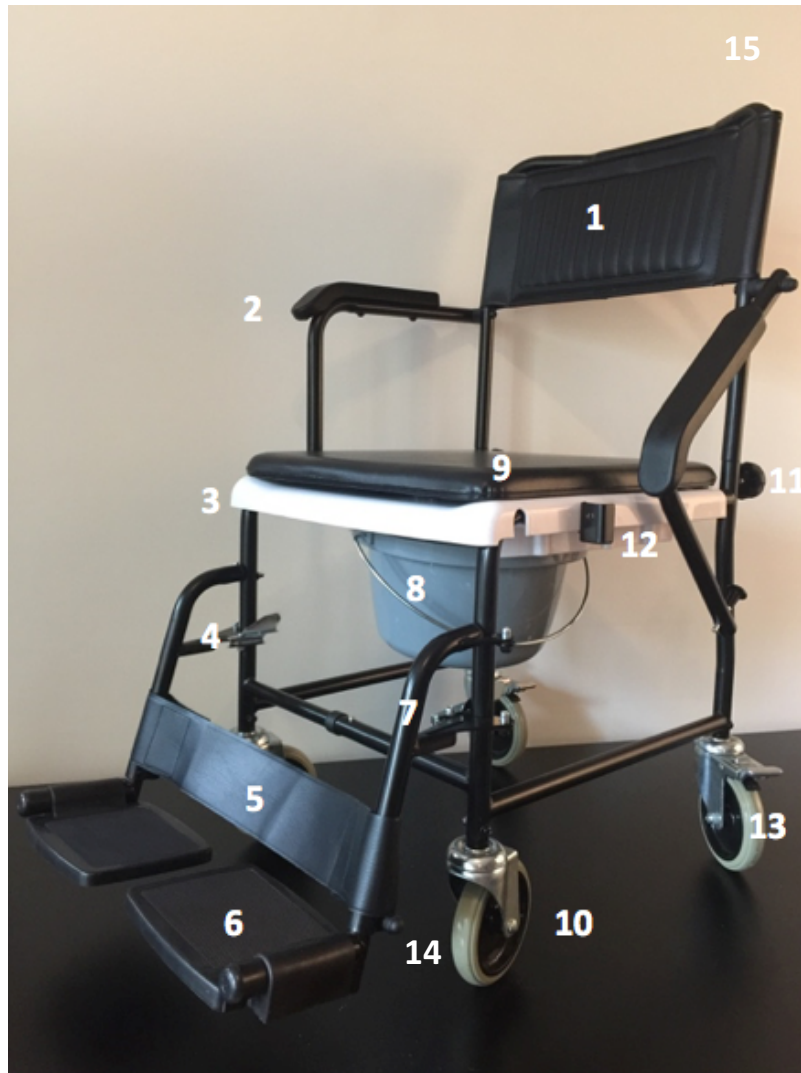

1 – Rückenlehne mit Polster

2 – gepolsterte Armlehnen

3 – Toilettensitzbrille

4 – Beinstützenverstellung

5 – Wadenband

6 – klappbare Fußstütze

7 – Beinstützen

8 – Toiletteneimer mit Deckel

9 – gepolsterte Sitzauflage

10 – Lenkrolle

11 – Feststellschraube für Rückenlehne

12 – Seitenteilverriegelung

13 – Lenkrolle mit Brems- und

Richtungsfeststeller

14 – Höhenverstellung Fußstütze

15 – Schiebebügel

ⓓ Gebrauchsanweisung

12. Montage

Der TITAN Clean ist bereits vormontiert und kann sehr leicht ohne Werkzeug zusammengebaut werden.

- Schritt 1) Stellen Sie das Unterteil des TITAN Clean auf einen festen Untergrund. Spreizen Sie den Rahmen auseinander indem Sie an den Längsseiten des Rahmens ziehen. Ziehen Sie so lange, bis die drei Golddruckknöpfe vollständig eingerastet sind.



- Schritt 2) Platzieren Sie die weiße Toilettensitzbrille des TITAN Clean mit Eimer auf dem Stuhlrahmen. Drücken Sie auf die Sitzbrille bis diese auf dem Rahmen einrastet und sich stabilisiert.



D Gebrauchsanweisung

- Schritt 3) Schieben Sie die Rückenlehne des TITAN Clean in die dafür vorgesehenen Rohre im Unterteil des Rahmens bis diese einrasten.



- Schritt 4) Ziehen Sie die Armlehnen des TITAN Clean nach oben bis diese im vorderen Teil des Rahmens einrasten. Zum Lösen der Armlehnen einfach die Seitenteilverriegelung betätigen.



① Gebrauchsanweisung

- Schritt 5) Setzen Sie die zwei schwarzen Knopfschrauben in die Schraubenlöcher ein, in denen der Rückenlehnenrahmen auf den Sitzrahmen trifft. Festziehen und auf Stabilität prüfen!



- Schritt 6) *Aufsetzen der Fußstützen:* Setzen Sie die oberen und unteren Stifte der Fußstütze auf die vorgesehenen Stifte zur Seite (90° zur Stuhlvorderseite) und schwenken Sie die Fußstütze nach vorne, bis sie einrastet


Abnehmen der Fußstützen: Schieben Sie den kleinen schwarzen Hebel und lassen Sie die Fußstützen, um 90 Grad ausschwingen, heben Sie direkt nach oben, um zu entfernen

Wadenband: Montieren Sie die Enden des Gurtes um das Bein jeder installierten Fußstütze. Sichern Sie jede Seite des Gurtes, indem Sie die Klettverschlussstücke anschließen.



Ⓛ Gebrauchsanweisung

Schritt 7) *Höhenverstellung der Fußstützen:* Lösen Sie die Schraube (roter Pfeil). Nun können Sie die Fußstütze in der Höhe verstellen (ca. 6 cm). Achten Sie darauf, dass die Fußstütze nicht den Boden berührt und ca. 2 cm Luft zum Boden hat.

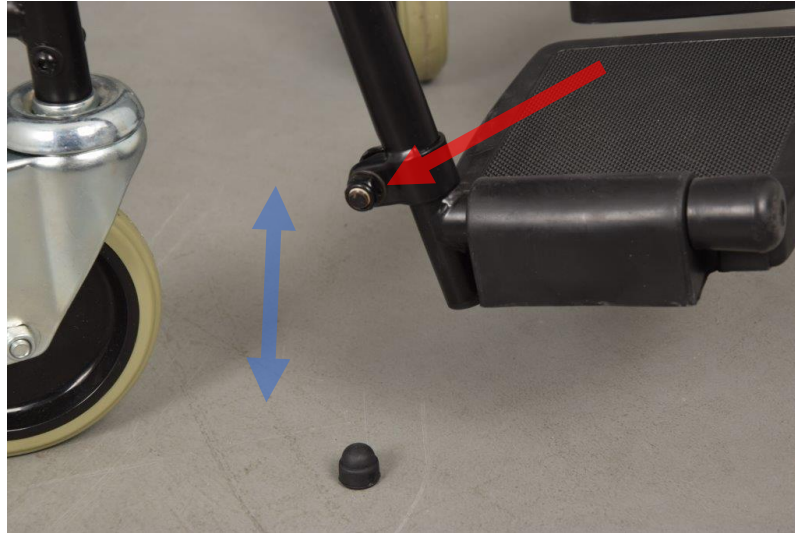

13. Sitzen



Personen mit eingeschränkter Mobilität empfehlen wir zur eigenen Sicherheit die Nutzung des TITAN Clean nur mit Hilfe von Betreuungspersonen zu nutzen

Die Benutzung als Toilettenstuhl:

1. Beide Feststellbremsen arretieren
2. Die gepolsterte Sitzauflage abnehmen
3. Zum bequemerem Einsteigen eine Armlehne nach unten und eine Fußablage nach oben klappen.
4. Deckel vom Eimer abnehmen und Eimer in die Mitte platzieren
5. Nehmen Sie bequem auf Ihrem TITAN Clean Platz
6. Fußablage und Armlehne herunter klappen
7. Füße auf die Fußablage stellen

Alternativ zur Nutzung mit dem Eimer, kann der TITAN Clean auch über jedes übliche Toilettenbecken gefahren werden.


14. Arretieren der Feststellbremse



Die Feststellbremse wird mit dem Fuß durch Heruntertreten des Feststellbügels arretiert.

(Roter Pfeil)

Durch erneutes Heruntertreten am oberen Ende des Feststellbügels lösen Sie die Feststellbremse wieder (Blauer Pfeil)

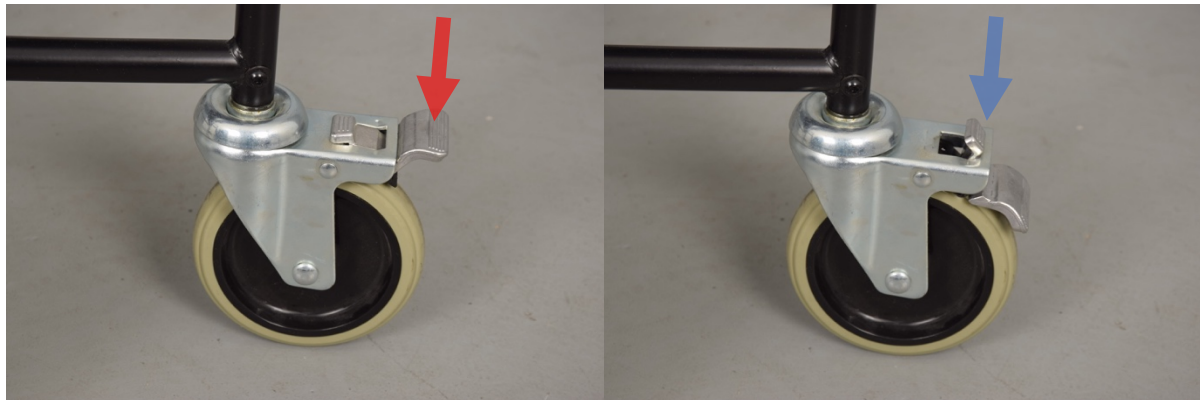

15. Entnahme von Eimer und Sitzbrille



Bitte immer vorsichtig
Verletzungsgefahr durch Einklemmen

- Den Eimer NIE herausziehen, wenn die Person noch auf dem TITAN Clean sitzt
- Den Eimer zum Leeren nach hinten rausziehen
- Deckel draufsetzen
- Nach dem Entleeren wie empfohlen reinigen
- Um die Sitzbrille abzunehmen diese ruckartig nach oben abheben



16. Abstellen / Verwahrung

Bei Nichtgebrauch oder nach der Benutzung kann der TITAN Clean durch Einklappen der Fußstützen und Abnehmen der gepolsterten Rückenlehne gut verkleinert werden und findet dadurch Platz in jedem Haushalt.

17. Reinigen

Zum Reinigen können Sie handelsübliche Desinfektionsmittel verwenden.

Nach Gebrauch empfehlen wir Ihnen wie folgt:

Toilettensitzbrille

Lösen Sie die Toilettensitzbrille durch leichten Zug nach oben vom Gestell. Nun können Sie die Toilettensitzbrille unter warmen, fließenden Wasser (Dusche) abspülen und trocknen, ggfls. desinfizieren.

Eimer

Den Eimer nach hinten aus der Führung ziehen, nach Gebrauch entleeren, mit warmen Wasser ausspülen, trocknen und desinfizieren.

Gestell, Rückenlehne, Armlehne und Sitzfläche / Auflage

Das Gestell lässt sich am besten reinigen wenn Sie vorher die Toilettensitzbrille und den Eimer entfernt haben. Wischen Sie mit einem feuchten Lappen alle Teile gründlich ab. Anschließend desinfizieren Sie sämtliche Teile.

18. Problembehandlung

Am besten übergeben Sie den TITAN Clean bei Problemen an den Fachhandel. Ausgenommen sind solche Probleme, die durch Reinigung beseitigt werden können wie z.B. die Verschmutzung der Lenkrollen vorne durch Dreck oder Fremdkörper. Reinigen Sie die Räder und entfernen Sie die Fremdkörper. Sollte keine Besserung eintreten bitte wie oben beschrieben immer den TITAN Clean an den Fachhändler zur Reparatur / Wartung übergeben.

19. Wartung

Ihr TITAN Clean ist wartungsfrei. Wenn eine Wartung notwendig werden sollte, übergeben Sie den TITAN Clean bitte dem Fachhandel.

Wir empfehlen folgende Maßnahmen durchzuführen:

- Tägliche Überprüfung der Wirkung der Bremsen durch Benutzer / Betreuer
- Tägliche Reinigung / Desinfektion durch Benutzer / Betreuer
- Monatliche Prüfung der Lenkrollen vorne durch Benutzer / Betreuer
- 1 x jährlich generelle Überprüfung durch Fachhandel



20. Wiedereinsatz

Bei der Weitergabe / Wiedereinsatz des TITAN Clean denken Sie bitte daran sämtliche für eine sichere Handhabung notwendigen technischen Unterlagen dem neuen Benutzer zu übergeben. Der TITAN Clean ist problemlos für einen Wiedereinsatz geeignet. Der TITAN Clean muss durch den Fachhandel, wie oben angegeben, überprüft, gereinigt und für den Wiedereinsatz in einen einwandfreien Zustand versetzt werden.

Bei einem Wiedereinsatz sind der Eimer, inkl. Deckel, und die Toilettensitzbrille aus hygienischen Gründen zu tauschen.

21. Entsorgung

Wenn Ihr TITAN Clean die Nutzungsdauer erreicht hat oder aus anderen Gründen nicht mehr benutzt

werden kann, geben Sie das Hilfsmittel zur fachgerechten Entsorgung an den Fachhandel.

22. Garantie

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate und bezieht sich auf alle Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material – oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind

23. Technische Daten

Maximale Zuladung	:	113 kg
Leergewicht	:	12,1 kg
Gesamtbreite	:	550 mm
Gesamttiefe ohne Fußstützen	:	580 mm
Gesamttiefe mit Fußstützen	:	845 mm
Gesamthöhe	:	942 mm
Sitzhöhe	:	500 mm
Rückenhöhe	:	460 mm
Sitzbreite	:	450 mm
Sitztiefe	:	440 mm
Bereifung	:	Ø 128 mm x 27,3 mm, pannensicher Vorderräder lenkbar, Hinterräder lenkbar mit Brems- und Richtungsfeststeller
Material Rahmen	:	Stahl mit gegen Korrosion schützender Lackierung
Material Sitz	:	PU-Schaum mit PVC überzogen
Material Rückenlehne	:	PU-Schaum mit PVC überzogen
Material Armlehnen	:	PU
Material Toiletteneimer	:	Polypropylen

Der gesamte Toilettenstuhl TITAN Clean ist gegen Korrosion geschützt.

Das Gestell ist mit einer gegen Korrosion schützenden Lackierung überzogen.

Bei den Rädern handelt es sich um verzinkten Stahl, welche somit gegen Korrosion geschützt sind.