

D Gebrauchsanweisung

Leichtgewicht-Rollator TITAN Go
TT 9205 S



Hilfsmittel Nr. 10.50.04.1215



Hersteller:

TriPart Titan GmbH & Co.KG
50739 Köln



Gebrauchsanweisung

Allgemeines

Für den hier beschriebenen Rollator ist die Konformität gemäß der EG – Richtlinie 93/42, für Medizinprodukte, erklärt. Diese Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Lieferumfangs. Sie ist beim Benutzer bereitzuhalten und bleibt auch bei Weitergabe des Produktes beim Produkt. Änderungen durch technische Weiterentwicklungen gegenüber den in dieser Gebrauchsanweisung dargestellten Ausführung behalten wir uns vor.

Nachdrucke, Übersetzungen und Vervielfältigungen in jeglicher Form, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Herstellers.

Das Urheberrecht liegt beim Hersteller.

Diese Gebrauchsanweisung unterliegt keinem Änderungsdienst. Den jeweils aktuellen Stand erfahren Sie gerne bei uns.

Indikation und Verwendungszweck

Der Rollator TITAN Go dient bewegungseingeschränkten Personen mit max. 136 kg Körpergewicht als Gehhilfe und eingeschränkt auch als Sitzgelegenheit zum vorübergehenden Ruhen. Die unter der Sitzfläche eingehängte Einkaufstasche ist zur Ablage und zum Transport von Gegenständen oder Waren vorgesehen und geeignet.

Der Rollator TITAN Go darf nur auf festem und ebenem Untergrund verwendet werden. Er ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.

Kontraindikationen sind bei bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht bekannt. Die Benutzung zu anderen Zwecken, insbesondere die Verwendung als Aufstiegshilfe oder zum Transportieren schwerer Lasten ist bestimmungswidrig und gefährlich!

Aufstellen / Entfalten des Rollators

- Positionieren Sie den Rollator vor sich in Fahrtrichtung
- Betätigen Sie die Feststellbremse
- Halten Sie den Rollator mit der einen Hand am Handgriff
- Drücken Sie mit der anderen Hand den Klappmechanismus nach unten bis er spürbar einrastet
- Klappen Sie den Sitz nach unten
- Klappen Sie die Rückenlehne in Gebrauchsposition





Gebrauchsanweisung

Falten des Rollators

- Positionieren Sie den Rollator in Fahrrichtung vor sich und betätigen Sie die Feststellbremsen
- Klappen Sie den Sitz hoch
- Halten Sie den Rollator mit der einen Hand am Handgriff
- Lösen Sie mit der anderen Hand den Klappmechanismus mit einem Zug aus der Verankerung
- Nun ziehen Sie den Rollator ganz zu sich heran



Schiebegriff einstellen

- Betätigen Sie als Erstes die Feststellbremse
- Lösen die Verschraubung und nehmen Sie die Befestigungsschraube ganz heraus
- Positionieren Sie die Schiebegriffe in der korrekten Höhe
Empfehlung: Schiebegriffe sollten sich in der Höhe des Handgelenks befinden
- Anschließend sind die Befestigungsschrauben wiedereinzusetzen und mit der Sternmutter festzuziehen.



Achten Sie bitte darauf, dass die Schraube **komplett** in der Bohrung versinkt. Zum Verstauen des Rollators können Sie die Schiebegriffe auch ganz aus dem Rahmen nehmen


D Gebrauchsanweisung



Achten Sie bitte darauf die Schiebegriffe in der richtigen Höhe einzustellen um die größtmögliche Sicherheit beim Benutzen des Rollators und ein bequemes Gehen zu gewährleisten.

Betriebs- und Feststellbremse

- Die dosierbare Bremse wird als Betriebsbremse (beim Schieben) durch ziehen des Bremshebels nach oben verwendet
- Durch Drücken des Hebels nach unten wird die Bremse als Feststellbremse (beim Parken) verwendet

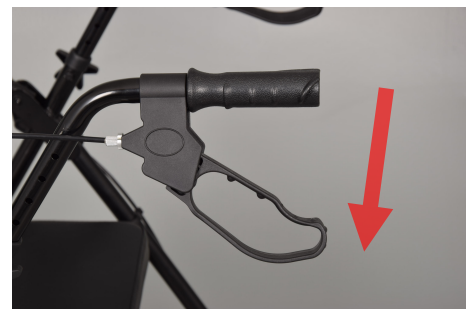




Gebrauchsanweisung


Bremseinstellung

- Die Bremswirkung kann direkt am Bremshebel oder am Bowdenzug eingestellt werden
- Die Bremse ist korrekt eingestellt, wenn die Bremshebel, wie auch die Bowdenzüge, kein Spiel aufweisen und die Räder sich ohne Schleifgeräusche drehen lassen

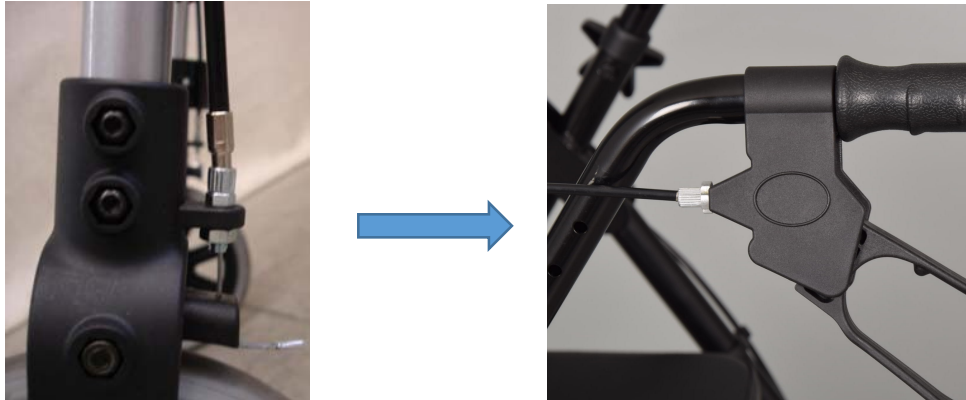

Rückenbügel

- Der Rückenbügel ist so klappbar, dass Sie sich beim Sitzen von vorne oder von hinten auf dem Rollator anlehnen können (blauer Pfeil)
- Bei Bedarf können Sie den Rückbügel durch Druck auf die seitlichen Schnappverschlüsse auch aus dem Rahmen lösen (roter Pfeil)

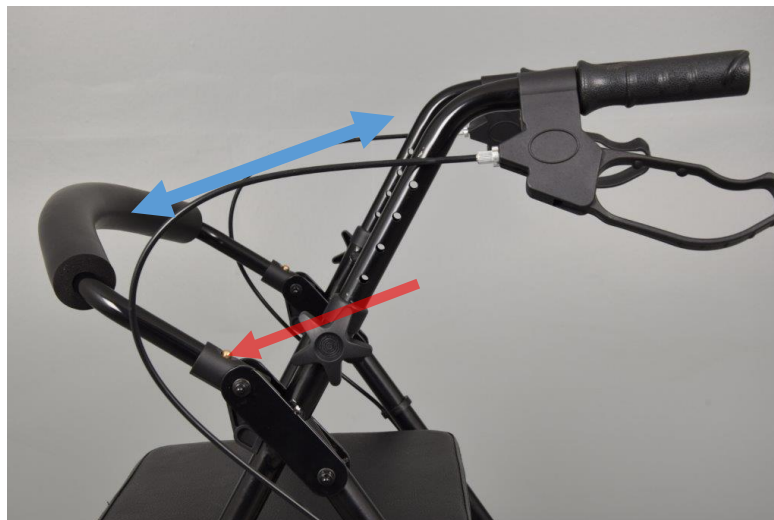



Gebrauchsanweisung

Sicherheitshinweise

- Bitte hängen Sie zur eigenen Sicherheit KEINE Taschen an die Griffe
- Beim Benutzen auf abschüssigen Wegen benutzen Sie bitte die Betriebsbremse
- Benutzen Sie den Rollator nur auf ebenem, horizontalem und festem Untergrund
- Beim starken Aufstützen auf die Handgriffe kann der Rollator nach hinten kippen
- Beim Zusammenklappen des Rollators können Kleidungs- oder Körperteile eingeklemmt werden
- Bitte beachten Sie, dass die Polsterteile, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, aufheizen und bei Berührung Hautverletzungen verursachen können. Decken Sie daher diese Teile ab oder schützen Sie den Rollator vor Sonneneinstrahlung

Reinigung

Die Reinigung und Desinfektion sollten in regelmäßigen Abständen (bei Benutzerwechsel zwingend erforderlich) durchführen. Zur Reinigung verwenden Sie eine milde Seifenlauge ohne Scheuerzusätze.

Die Desinfektion können Sie mit handelsüblichen Mitteln durchführen. Verwenden sie keine Hochdruckreiniger, Dampfstrahlgeräte und keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel!

Wartung

Der Rollator ist wartungsfrei. Wenn Sie ein Nachlassen der Bremsen, Schwergängigkeit der Räder oder andere Funktionseinschränkungen feststellen, ist der Rollator für eine Instandsetzung dem Fachhandel zu übergeben.

Wiedereinsatz

Bei der Weitergabe / Wiedereinsatz des Rollators denken Sie bitte daran sämtliche für eine sichere Handhabung notwendigen technischen Unterlagen dem neuen Benutzer zu übergeben. Der Rollator ist problemlos für einen Wiedereinsatz geeignet. Der Rollator muss durch den Fachhandel, wie oben angegeben, überprüft, gereinigt und für den Wiedereinsatz in einen einwandfreien Zustand versetzt werden. Der Rollator wird gebrauchsfertig ausgeliefert und kann sofort entfaltet und angepasst werden. Eine Montage ist nicht erforderlich.

Lieferumfang

- Stahl Rollator TITAN Go
- Einkaufstasche
- Gebrauchsanweisung
- Stockhalter

Garantie

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate und bezieht sich auf alle Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material – oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind



Gebrauchsanweisung

Technische Daten

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Maximale Zuladung | : | 136 kg / Einkaufstasche 3 kg |
| Leergewicht | : | 8,7 kg |
| Gesamtbreite | : | 600 mm |
| Gesamttiefe | : | 630 mm |
| Gesamthöhe | : | 820 – 920 mm |
| Abstand zwischen den Handgriffen | : | 480 mm |
| Wendedurchmesser | : | 710 mm |
| Sitzhöhe | : | 550 mm |
| Verstellungen | : | Schiebegriff 820 – 920 mm (5 – fach) |
| Bereifung | : | Ø 200 mm x 37 mm, pannensicher Vorderräder lenkbar, Hinterräder starr |
| Material Rahmen | : | Stahl mit korrosionshemmender Lackierung |
| Material Sitz | : | Schaumstoff mit PVC überzogen |
| Material Handgriffe | : | PVC |
| Material Bremshebel | : | Polypropylen |